

简洁、高效的 InBody 数据管理软件

Lookin'Body120

新会员注册

新会员注册

必填项

姓名

ID 171225-2 * 是否自动分配 ID? ☒ 使用 ☐ 不使用

* 仅限小写字母和数字 (4 至 14 个字符)

身高 cm

性别 ☒ 男性 ☐ 女性

出生日期 年 月 日 * 未满 18 周岁者, 请输入出生日期计算确切年龄。

年龄

附加信息 * 在设置中可以更改病史和备注。取消隐藏

☒ 注册后立即开始 InBody 测试。

注册

注册会员后, 进行 InBody 测试时, 无需再次输入 ID, 身高等个人信息。

Lookin'Body120

选择会员

按名字或 ID 搜索 15121044963 搜索 列出所有会员列表

按 InBody 测试日期搜索 搜索 新会员注册

选择测试

InBody 测试

管理结果

打印 发送电子邮件 修改

用户指南

首先, 选择一位会员。

选择会员后, 您可以使用菜单顶部的“选择测试”或“管理结果”。


选择	姓名	ID	身高 (cm)	年龄	性别	会员信息	健康报告
----	----	----	---------	----	----	------	------

InBody270: 连接成功 (Bluetooth: INBODY270-PG00000003) Ver. LB120.3.0.1.S

会员搜索：可通过姓名、ID、InBody 测试日期来搜索相应的会员信息，并进行 InBody 测试。



InBody 测试：一键就可以进行 InBody 测试。

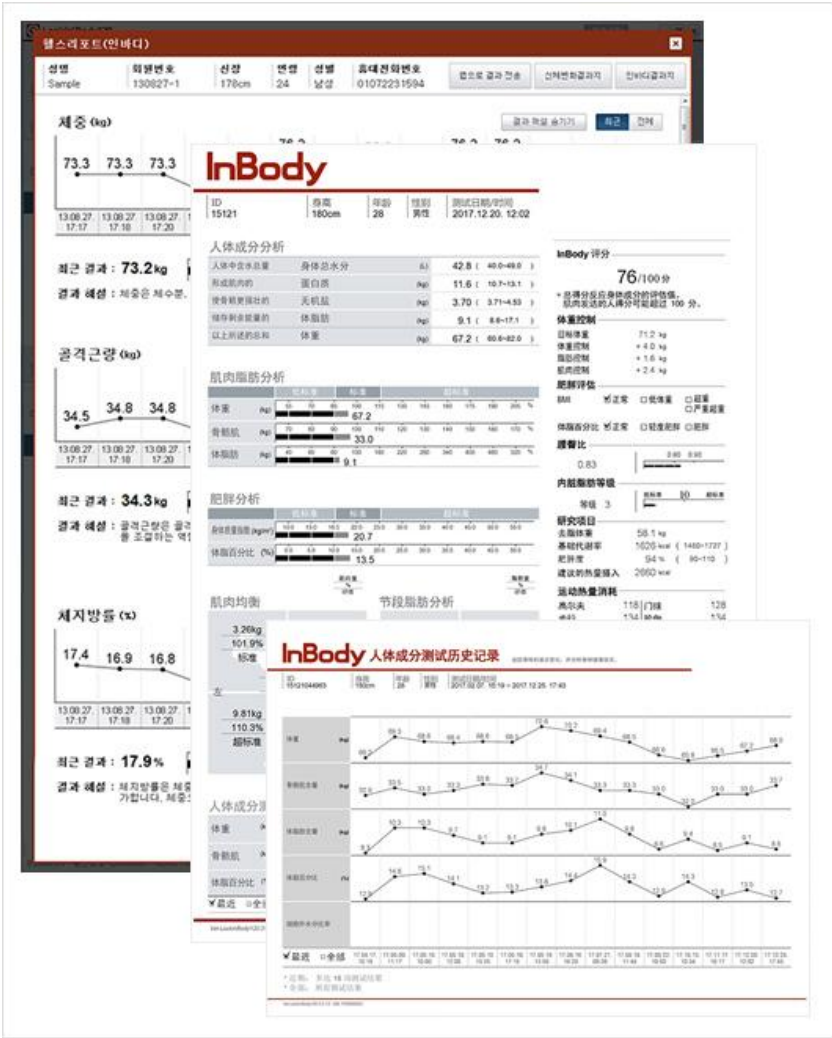

数据导出为 CSV 或图片文件。

将 Lookin'Body120 的测试结果转为 CSV 或图片格式的文件，并保存至顾客指定的文件夹内。

健康报告，打印报告纸

健康报告可根据会员多次的 InBody 测试记录，一目了然地展现会员的身体成分变化，并能给会员提供有效的健康处方。Lookin'Body120 还可以打印 InBody 报告纸、测试历史报告纸、InBody 结果解析报告纸等多种报告纸。

InBody 报告纸：打印 InBody 专用报告纸。



InBody 测试历史报告纸

可以打印会员的所有测试历史记录的报告纸。



InBody 结果解析

便于非专业人士查阅。

InBody 结果说明

ID	身高	年龄	性别	测试日期/时间
15121044963	180cm	28	男性	2017.12.25. 17:43

InBody 测试

InBody 测试不仅检查体内成份、如身体水分含量、体脂肪、蛋白质和无机盐、而且也反映了体脂百分比、肌肉分布和体内水分平衡程度；所有部分对了解身体的更多状况很关键。

结果说明

人体成份分析

体重是指身体水分含量、蛋白质、无机盐和体脂肪含量的总和。维持身体营养均衡，保持健康状态。

肌肉脂肪分析

比较骨骼肌含量横条和体脂肪含量横条的长度。骨骼肌含量横条比体脂肪含量横条的长度越长、身体越强壮。

肥胖分析

身体质量指数是采用身高和体重来判断肥胖的指数。 体脂百分比是体脂肪量与体重的百分比。

肌肉均衡


评估体内各个部位的肌肉量的项目。以实际体重为基准，评估肌肉量是多还是少。

节段脂肪分析

评估体内各个部位的脂肪量的项目。以理想体重为基准，评估脂肪量是多还是少。

人体成分测试历史记录

跟踪身体成份变化历史。 定期进行 InBody 测试，监测您的进度。

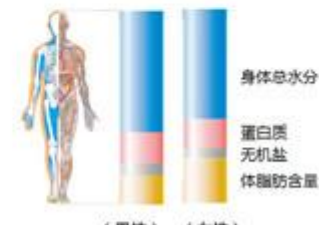

（男性） （女性）

身体总水分
蛋白质
无机盐
体脂肪含量

VeriLookInBody120 3.0 1.0 - SN: PG00000003

Copyright © 1996- by Biospace Co., Ltd. All rights reserved. 88-(PNS-00-001)-A-130408